



Analyse	Type de prélèvements	Matériel de transport	Informations complémentaires
Culture Bactériologie Ou Dépistage Strepto B	Vaginal	Milieu AMIES (+ écouvillon fourni) 	Préciser si recherche de gonocoque et <i>T.vaginalis</i> . Réaliser le prélèvement, ouvrir le tube de milieu de transport et jeter le bouchon, mettre l'écouvillon dans le milieu, bien refermer.
	Endocol Urétral		
PCR <i>C. trachomatis</i> / gonocoque	Vaginal	Milieu BD Molecular Swab buffer (+ écouvillon fourni) 	Réaliser le prélèvement, ouvrir le tube de milieu de transport puis casser l'écouvillon dans le milieu, refermer le tube.
	Endocol		
	Urétral		
	Anal		
	Pharyngé		
	Urines	Pot aseptique bouchon rouge 	Urines de premier jet , après stase mictionnelle de 2 heures . Au laboratoire , transférer 2ml d'urines dans le milieu BD Molecular urine dans les 2 heures.
PCR <i>M.genitalium</i>	Vaginal	Milieu APTIMA® Swab specimen Transfer Tube 	2 écouvillons fournis : <u>fin</u> : urétral <u>épais</u> : vaginal ; cervical. Réaliser le prélèvement, ouvrir le tube de milieu de transport puis casser l'écouvillon dans le milieu, refermer le tube.
	Endocol		
	Urétral	Milieu APTIMA® Swab specimen Transfer Tube 	
	Urines	Milieu APTIMA® Urine Specimen Collection Kit 	
PCR HSV ou VZV	Vésicules	Milieu Virus M4RT UTM ou VTM	Prendre l'écouvillon épais pour gratter le plancher de la vésicule.



Site de LAVAL
33 rue du Haut Rocher
BP1525
53015 LAVAL

Prélèvement génitaux matériel de transport

T-PRE-FT-001-02
Version : 2
Applicable le : 18-12-2023



Réaliser le prélèvement, ouvrir le tube de milieu de transport puis casser l'écouvillon dans le milieu, refermer le tube.