

1
Sorter la seringue de son emballage et retirer le bouchon de purge safeTIPCAP
Pré-positonner le piston de la seringue en fonction du volume de sang à prélever



3
La pression artérielle remplira automatiquement la seringue lors du prélèvement


Connecter la seringue au montage en tenant le piston orienté vers le haut



Placer le bouchon ventilé safeTIPCAP sur le lueur et tournez le d'1/4 de tour afin d'assurer l'étanchéité avec le corp de la seringue



Déloger les bulles d'air en tapotant sur le corp de la seringue

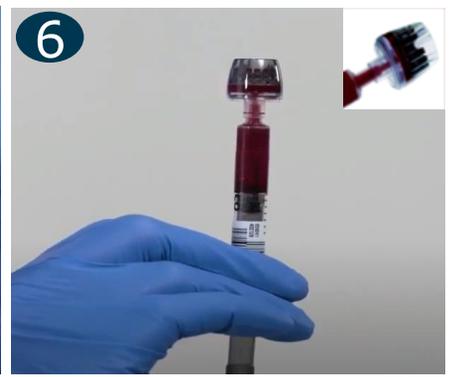

Appuyer doucement sur le piston pour purger l'échantillon jusqu'à sentir une butée



Homogénéiser le prélèvement par retournement afin d'agir contre la formation de caillots

8
Assurez-vous que la seringue porte une étiquette avec l'ID patient avant de quitter son chevet

9
Analyser l'échantillon immédiatement ou transmettre rapidement au laboratoire